

*Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.
Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner*

CHECKLISTA VID BEHANDLING

KONTROLLERA INNAN START:

- Att maskinen är värmekörd.
- Slangar och tryckgivare rätt kopplade
- Rätt vätskenivå i artär- och venkammare
- Venslangen insatt i venklämman (optisk detektor)
- Dialysatslangar rätt kopplade
- Att flödeslampan är på och att konduktiviteten inte avviker
- Att proppar och klämmor är stängda på expansionskammare, luftvakt och "slutändar"
- Att alla slangar är primade och vätskefyllda, vätska finns i uppsamlingspåse

EFTER START

- Blodpumpen är ställd
- UF-på
- Antikoagulantia, startdos given
- Vätskenivån i artärkammare och venkammare

EFTER DIALYS

- Desinfektion
- Signera kontrollistan
- Torka maskinen

